



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Sirolimus

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de sirolimus (intervalle de référence greffe dépendant).

#### Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Rapamune, Rapamycine

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999070

##### Lien

[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

##### Lien

[TDM, suivi thérapeutique des médicaments, recommandations](#)

#### Renseignements à fournir

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 5-7 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

### Volume minimum

0.3 ml

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Conservation

Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.3 ml)

### Conditions d'acheminement

A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 31 44 280

### Site web

Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Résultats

#### Interprétation

**Obtention des résultats** : le mercredi pour les prélèvements reçus le mardi avant 12h00.

**Interprétation par la Pharmacologie clinique** : durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas d'urgence**.

#### Méthode analytique

##### Principe de la méthode

- LC-MS/MS

##### Technique

Mesure après extraction du sang complet

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	135
<b>Prestation Tarmed</b>	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min