



Catalogue des analyses - Laboratoire

Spectrophotométrie

LCR

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Diagnostic des hémorragies sous-arachnoïdiennes

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Fréquence d'exécution

1 à pls x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

[012 – Chimie clinique – Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)
- Sang

Instruction(s) particulière(s)

Le
prélèvement LCR pour l'analyse spectrophotométrique doit être le
dernier tube
collecté de la PL.

La PL
doit être effectuée idéalement au moins 12 h après l'apparition des
symptômes,
l'interprétation sera réservée si ce délai n'est pas respecté.

Le LCR ne doit pas être transporté par poste
pneumatique et doit être adressé rapidement au laboratoire pour
effectuer une
centrifugation et un décantage. Protéger le tube LCR de la lumière
(papier
d'aluminium).

Joindre un tube de plasma concomitant (héparinate de
lithium 2.6 ml).

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube Sarstedt en polypropylène 10mL stérile
N° de commande : 966681

Contenant(s) autre(s)

Joindre un tube de plasma concomitant (héparinate de lithium 2.6 ml).

Volume minimum

1 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger à 3600G durant 5 min le LCR et le plasma. Décanté le
sérum, volume minimal: 2 ml.

Décanté le LCR, volume minimal: 1ml. Protéger le tube LCR de la
lumière (papier d'aluminium). Congeler les deux tubes (-20°C).

Conservation

-20°C.

Conditions d'acheminement

Envoyer les tubes de LCR et de sérum congelés (-20°C).

Acheminement



Conditions d'acheminement	Protéger le tube LCR de la lumière (papier alu). Ne pas utiliser la poste pneumatique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Délai de rendu	< 4h
Interprétation	Interprétation 24h/24, nuits et week-end compris.

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	49.2
--------------------	------