



Catalogue des analyses - Laboratoire

# T3 libre

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>Ajout d'analyse</b>	possible si sérothèque existante
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	triiodothyronine libre
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 999069</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></p>

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

<b>Volume minimum</b>	1 microtube bien rempli (pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	Augmenter le nombre de microtubes
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Réfrigéré</b>	24h
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	Centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml
<b>Conservation</b>	Conserver le sérum à 4°C ; si > 48 h, conserver à -20°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	A T° ambiante
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- ECLIA

#### Analyseur

cobas e 801 / Roche Diagnostics

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

#### Tarif

**Tarif (CHF)** 9.4