



Catalogue des analyses - Laboratoire

# T4 libre

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** possible si sérothèque existante

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Synonyme** thyroxine libre

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
061219  
**Lien**  
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

#### Volume minimum

1 microtube bien rempli  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Augmenter le nombre de microtubes

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

24h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

#### Conservation

Conserver le sérum à 4°C ;  
si >48 h, conserver à -20°C

#### Conditions d'acheminement

A T° ambiante

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires 24/24</u></a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Chimie clinique</u></a>

### Méthode analytique

### Principe de la méthode

- ECLIA

### Analyseur

cobas e 801 / Roche Diagnostics



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

3 mois

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

8.1