



Catalogue des analyses - Laboratoire

T4 totale

Sang

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ajout d'analyse | possible si sérothèque existante |
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique |
| Synonyme | thyroxine totale |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang |


Pré analytique

Prélèvement

| | |
|--------------------------|--|
| Nature | <ul style="list-style-type: none"> Sang veineux |
| Matériel standard | |
| Quantité | 1 |

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel

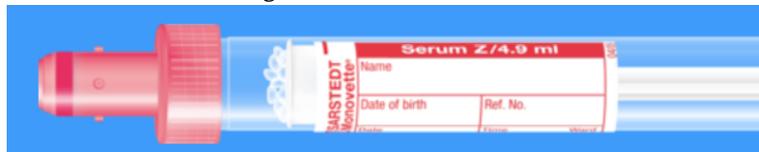

Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

| | |
|------------------|------------------------|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Microtube 0.3 ml sérum |



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

| | |
|---|--|
| Volume minimum | 1 microtube bien rempli (pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis) |
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Augmenter le nombre de microtubes |
| Stabilité maximale avant envoi | |
| Réfrigéré | 24h |
| Traitement du prélèvement pour requérants externes | |
| Préparation | Centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml |
| Conservation | Conserver le sérum à 4°C; si > 48 h, conserver à -20°C |
| Conditions d'acheminement | A T° ambiante |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | <u>Réception des laboratoires 24/24.</u> |

Analytique

Prestataire

| | |
|---|-----------------------------------|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | Chimie clinique |

Résultats

| | |
|-------------------------------|---|
| Délai de rendu | < 8h |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | <ul style="list-style-type: none">ECLIA |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Analyseur | cobas e 801 / Roche Diagnostics |
|------------------|---------------------------------|

Post analytique

Conservation après examens

| | |
|-------------------------|--------|
| Aliquote congelé | 3 mois |
| Tarif | |
| Tarif (CHF) | 8.1 |