



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Testostérone

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** possible si sérothèque existante

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** Jours ouvrables : 1x / jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Synonyme** Testostérone totale

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
061219  
**Lien**  
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux


#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium

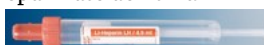

Monovette bouchon orange - N° commande : 510208

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

#### Volume minimum

2 microtubes bien remplis  
(pour les demandeurs externes : 3 microtubes bien remplis)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le plasma :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

#### Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

#### Conditions d'acheminement

- par transporteur : à T° ambiante  
- par poste : à 4°C

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100



<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires 24/24</u></a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Chimie clinique</u></a>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CMIA</li></ul>
<b>Analyseur</b>	Architect i / Abbott



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

**Tarif**

**Tarif (CHF)** 17.4