



Catalogue des analyses - Laboratoire

Testostérone

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution Jours ouvrables : 1x / jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Testostérone totale

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum	2 microtubes bien remplis (pour les demandeurs externes : 3 microtubes bien remplis)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Augmenter le nombre de microtubes
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml
Conservation	A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C
Conditions d'acheminement	- par transporteur : à T° ambiante - par poste : à 4°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• CMIA
Analyseur	Architect i / Abbott

Post analytique

Tarif	
Tarif (CHF)	17.4