



Catalogue des analyses - Laboratoire

Thyroglobuline

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Mesure de la thyroglobuline par une méthode hautement sensible.
Remarque: un test de recouvrement est réalisé d'office pour chaque échantillon, ce qui permet de révéler la plupart des interférences analytiques (anticorps anti-thyroglobuline, anticorps hétérophiles, etc.). Il est néanmoins recommandé de prescrire en parallèle à l'analyse de thyroglobuline un dosage des anticorps anti-thyroglobuline pour compléter le bilan biochimique.

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Tg, thyroglobuline

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 3

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Volume minimum 3 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :
– volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
– volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

Conservation A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C



Conditions d'acheminement Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Analyseur	Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific
Technique	TRACE

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an
Tarif	
Tarif (CHF)	39.6