



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Thyroglobuline

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Mesure de la thyroglobuline par une méthode hautement sensible.  
Remarque: un test de recouvrement est réalisé d'office pour chaque échantillon, ce qui permet de révéler la plupart des interférences analytiques (anticorps anti-thyroglobuline, anticorps hétérophiles, etc.). Il est néanmoins recommandé de prescrire en parallèle à l'analyse de thyroglobuline un dosage des anticorps anti-thyroglobuline pour compléter le bilan biochimique.

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Tg, thyroglobuline

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

3

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

#### Volume minimum

3 microtubes bien remplis

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

24h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

#### Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C



**Conditions d'acheminement** Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de chimie clinique    |
| <b>Site</b>                               | BH18-100                          |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439                               |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | 24/24H                            |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 121                     |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Chimie clinique</a>   |

### Résultats

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Délai de rendu</b>     | 1 semaine                              |
| <b>Méthode analytique</b> |  |
| <b>Analyseur</b>          | Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific |
| <b>Technique</b>          | TRACE                                  |

## Post analytique

### Conservation après examens

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Aliquote congelé</b> | 1 an |
| <b>Tarif</b>            |      |
| <b>Tarif (CHF)</b>      | 39.6 |