Catalogue des analyses - Laboratoire

TSH (thyrotrophine)

Sang

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	••

Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante	
Renseignement téléphonique	021 31 44 121	
Horaire de réalisation	24h/24	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Chimie clinique	
Synonyme	thyroid-stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, thyréotrophine, thyréotropine, thyrotropine, thyréostimuline, thyrostimuline, hormone thyréotrope, hormone thyréostimulante	
Prescription		

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

 ${\tt 1\,microtube\,bien\,rempli.}$

(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation Conserver le sérum à 4°C; si > 48 h, conserver à -20°C

Conditions d'acheminement A T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	3 mois

8.1



Aliquote congelé

Tarif

Tarif (CHF)