

Catalogue des analyses - Laboratoire

TSH (thyrotrophine)

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme thyroid-stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, thyrotrophine, thyrotropine, thyrotropine, thyrostimuline, thyrostimuline, hormone thyrotrope, hormone thyrostimulante

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061219
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Volume minimum

1 microtube bien rempli.
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

Conserver le sérum à 4°C ; si > 48 h, conserver à -20°C

Conditions d'acheminement

A T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">ECLIA
-------------------------------	---

Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics
------------------	---------------------------------



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

8.1