

Catalogue des analyses - Laboratoire

TSH (thyrotrophine)

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Chimie clinique
Synonyme	thyroid-stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, thyrotrophine, thyrotropine, thyrotropine, thyrostimuline, thyrostimuline, hormone thyrotrope, hormone thyrostimulante
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Sang veineux
---------------	--

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel 

Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum 1 microtube bien rempli.
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 24h

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation Conserver le sérum à 4°C ; si > 48 h, conserver à -20°C

Conditions d'acheminement A T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECLIA

Analyseur cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 8.1