



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Urate

Urine 24h



## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse  
peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Synonyme

Acide urique

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

#### Renseignements à fournir

Volume et durée de la récolte.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine).  
Ne pas conserver l'urine native au frigo (risque de précipitation de sels d'urate).

#### Matériel standard

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Matériel pédiatrique

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

2 ml

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

**Analyseur** cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 2.5