Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00864

V18 - 04/11/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Valproate

Sang



Informations générales

Examen	

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de valproate (intervalle de référence disponible).
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	08h00-16h00, jours ouvrables (si demande en urgence, contacter le laboratoire)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Acide valproïque, Convulex, Depakine, Orfiril
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	 Délai d'équilibration : 2-3 jours à posologie constante Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 6 h postdose)
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Microtube 0.3 ml sérum **Contenant**



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

1 microtube bien rempli **Volume minimum**

(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

Centrifuger et décanter le sérum:

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum: - volume idéal : 500 µl - volume minimum : 200 µl
Conservation	à 4°C

à 4°C **Conditions d'acheminement**

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280



Site web Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation	Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500),
	sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas
	d'urgence.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• CMIA
Analyseur	Architect i1000 (Abbott)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	14.3

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

