



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Valproate

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de valproate (intervalle de référence disponible).

#### Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

08h00-16h00, jours ouvrables (si demande en urgence, contacter le laboratoire)

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Acide valproïque, Convulex, Depakine, Orfiril

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999070

Lien

[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

#### Renseignements à fournir

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 2-3 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 6 h post-dose)

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

### Volume minimum

1 microtube bien rempli  
(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le sérum:  
- volume idéal : 500 µl  
- volume minimum : 200 µl

#### Conservation

à 4°C

#### Conditions d'acheminement

à 4°C

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaires d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

**Prestataire**

**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

24/24H

**Téléphone**

021 31 44 121

**Site web**

Chimie clinique

**Résultats**

**Interprétation**

Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 **42 500**),  
sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas  
d'urgence**.

**Méthode analytique**

**Principe de la méthode**

- CMIA

**Analyseur**

Architect i1000 (Abbott)

## Post analytique

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

14.3

**Prestation Tarmed**

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min