

Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine B12

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse ne peut pas être ajoutée à une demande existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

cobalamine, cyanocobalamine, hydroxycobalamine,
methylcobalamine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Le même volume suffit si cumul avec Folate.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter sérum (vol min 0.3 ml)

Conservation Conserver le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h.

Conditions d'acheminement Envoyer le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h.

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics
------------------	--------------------------------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	22.5
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus