



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine B2 (FAD)

Sang



Informations générales

Examen


Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Riboflavine

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
------------------------------	--

Pré analytique


Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009</p>

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Un volume de prélèvement de 2 ml est suffisant pour réaliser des demar
cumulées de vitamines B1 et/ou B2 et/ou B6

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 1.2 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995</p>

Volume minimum	0.5 ml
-----------------------	--------

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Ne pas centrifuger, protéger de la lumière à l'aide de papier d'aluminium
Conservation	Sang complet à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou container à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 68.4

Condition(s) spéciale(s) Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus