



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine D (25-OH)

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Limitation selon la LA dès le 1.7.2022

1. Facturable une seule fois en cas de détermination séparée des deux formes de 25-hydroxy-vitamine D (25-OH-D₃ et 25-OH-D₂)
2. Uniquement chez les patients:
 - souffrant ou suspectés de souffrir d'une des pathologies suivantes:
 - ☒ ostéomalacie, rachitisme
 - ☒ ostéopénie
 - ☒ ostéoporose
 - ☒ fracture non traumatique
 - ☒ après une chute de cause peu claire chez les patients ≥ 65 ans
 - ☒ risque anamnestique accru de fracture les patients ≥ 65 ans
 - avec des pathologies suivantes affectant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption:
 - ☒ maladies rénales, y inclus l'urolithiase,
 - ☒ troubles de l'hormone parathyroïdienne, de la calcémie et/ou de la phosphatémie
 - ☒ maladies gastro-intestinales
 - ☒ syndromes de malabsorption
 - ☒ maladies hépatiques
 - prenant des médicaments influençant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption.
3. En cas de suivi du taux de vitamine D dans le cadre d'un des cas listés sous le point 2, l'analyse peut être facturée au maximum une fois tous les 3 mois.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Vitamine D₂ (25-OH), vitamine D₃ (25-OH), 25-hydroxy vitamine D₂, 25-hydroxy-vitamine D₃, 25-OH-vitamine D₂, 25-OH-vitamine D₃, calcidiol, calcifediol

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande


999069

Lien


010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p>
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	<p>Microtube 0.3 ml sérum</p>  <p>Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002</p>

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter sérum (vol idéal y.c sérothèque > 1 ml)
Conservation	<p>Conserver le sérum à 4°C</p> <p>si > 48 h conserver à -20°C</p>
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à température ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	<p>Bugnon 46</p> <p>1011 Lausanne</p>
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Analyseur LIAISON XL / DiaSorin

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 47.7

Condition(s) spéciale(s) Voir limitation d'indication clinique pour le remboursement par la LAMal.
Merci d'en informer le patient en cas de non remboursement.