



Catalogue des analyses - Laboratoire

Zinc

Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Analyse sous-traitée

OUI

Synonyme

Zn

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel

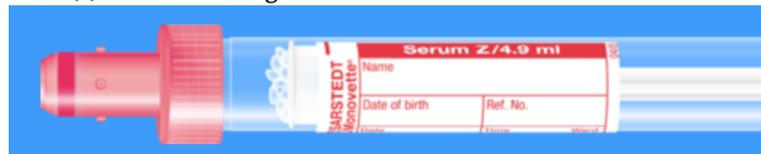

Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour sélénium et cuivre

Matériel pédiatrique

Quantité

3

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum (vol min. 0.4ml)
Conservation	Sérum à 4°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	39.6
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus