



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate)

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse Cette analyse permet de quantifier le pyridoxal-5-phosphate

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme B6 Vitamine, pyridoxine, vitamine B6

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses 2 ml pour réaliser des demandes cumulées des vitamines B1 et/ou B2 et

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Ne pas centrifuger, l'analyse est effectuée sur sang complet. Protéger de la lumière à l'aide de papier d'aluminium

Conservation Conserver à -20°C

Conditions d'acheminement Envoi sur glace sèche ou conteneur à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 61.2

Condition(s) spéciale(s) Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus