



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine E

Sang



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x /2 semaines
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Tocophérol, alpha-tocophérol
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>


Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009</p>

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses 2 ml pour réaliser des demandes cumulées des vitamines A et E

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 1.2 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995</p>

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger durant 5 min à ~3600 g. Décanter le plasma et protéger de la lumière

Conservation Conserver le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement Envoi congelé (glace sèche ou container)

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 61.2

Condition(s) spéciale(s) Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus