Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00875

V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Tobramycine**

Sang



## Information(s) importante(s)

#### **Attention**

• Acheminer immédiatement le tube

### Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de tobramycine (intervalle de référence pour une administration journalière unique).
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	08h00-16h00, 7j/7 (si demande en urgence, contacter le laboratoire)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Obracin, Tobi
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments
Renseignements à fournir	Documenter <b>l'heure réelle de la prise de sang</b> et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Pour une administration journalière unique, adaptation dès la 2ème dose (min.  $48\,\mathrm{h}$ ) :

taux résiduel : juste avant la dose suivantetaux au pic : à 1 h du début de la perfusion

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

Quantité

1

**Contenant** 

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum** 

1 microtube bien rempli.

(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

30 min

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter sans délai le sérum :

- volume idéal : 500 μl - volume minimum : 200 μl

Conservation

à - 20°C



Conditions d'acheminement	à - 20°C	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Acheminer sans délai (max 30 min. après le prélèvement)	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>	



### **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Interprétation	Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 <b>42 500</b> ), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique <b>en cas d'urgence</b> .	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• EMIT	
Analyseur	Cobas 8000 - Module c502	
Post analytique		

29.7



**Tarif** 

Tarif (CHF)

**Prestation Tarmed** 

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min