

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Tobramycine

Sang

## Information(s) importante(s)

**Attention**

Acheminer immédiatement le tube

## Informations générales

**Examen****But de l'analyse**

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de tobramycine (intervalle de référence pour une administration journalière unique).

**Indication diagnostique**

Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité.

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 121

**Fréquence et/ou horaire d'exécution**

08h00-16h00, 7j/7 (si demande en urgence, contacter le laboratoire)

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Chimie clinique

**Synonyme**

Obracin, Tobi

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

061207

**Lien**[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)**Renseignements à fournir**

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Pour une administration journalière unique, adaptation dès la 2ème dose (min. 48 h) :

- taux résiduel : juste avant la dose suivante
- taux au pic : à 1 h du début de la perfusion

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510312

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

#### Volume minimum

1 microtube bien rempli.  
(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

30 min

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter sans délai le sérum :

- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 200 µl

#### Conservation

à - 20°C

#### Conditions d'acheminement

à - 20°C

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Acheminer sans délai (max 30 min. après le prélèvement)



## Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

---

### Site

BH18-100

---

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

### Pneumatique

439

---

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

---

### Téléphone

021 31 44 280

---

### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation** Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500),  
sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas  
d'urgence**.

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • EMIT

**Analyseur** Cobas 8000 - Module c502

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 29.7

**Prestation Tarmed** Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min