



Catalogue des analyses - Laboratoire

Virus de la dengue

Sérodiagnostic antigène NS1 + IgG et IgM

Informations générales

Examen

But de l'analyse Détection de l'antigène NS1 (phase virémique précoce) et des IgG et IgM anti-virus de la dengue (séroconversion).

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée NON

Spécialité • Sérologie microbienne

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
913346
Lien
[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Renseignements à fournir En cas de test rapide effectué au lit de la patiente ou du patient, merci de préciser le résultat sur le formulaire de demande

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Contenant(s) autre(s)

Tube 7.5 ml sérum sans gel

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

- Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
- Décanter le sérum, volume minimal : 2 ml

Conservation

Frigo 4°C

Conditions d'acheminement

à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• ELFA
Analyseur	VIDAS



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

Tarif

Tarif (CHF) 93.6