



Catalogue des analyses - Laboratoire

Eubactérienne directe PCR

Biopsie tissu articulaire

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche à large spectre de DNA bactérien dans un échantillon clinique

1. Normalement stérile
2. Avec cultures négatives

Les prélèvements non normalement stériles ne sont pas acceptés (muqueuses, urines, prélèvements respiratoires, selles)

La sensibilité d'une PCR eubactérienne est inférieure à une PCR spécifique en conséquence privilégier une PCR spécifique si elle existe.

Un résultat négatif n'exclut pas une infection bactérienne

Justifications cliniques demandées idéalement par contact téléphonique au 021 314 41 07

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

Large spectre, broad spectrum PCR

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Biopsie tissu articulaire

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Service de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web [Microbio moléculaire](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 119.7