



Catalogue des analyses - Laboratoire

Panfungal PCR

Moelle osseuse

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|--|
| But de l'analyse | Recherche à large spectre de DNA de champignon dans un échantillon clinique |
| Indication diagnostique | Après cultures négatives Après un traitement anti-fongique Les prélèvements non normalement stériles (muqueuses, urines pré-l. respiratoires) ne sont pas acceptés |
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 107 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/jour |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none">• Diagnostic moléculaire microbiologique |
| Synonyme | Broad spectrum PCR, champignon, large spectre |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Moelle osseuse

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

AstreinteService de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**[Microbio moléculaire](#)**Résultats****Délai de rendu**

2-3 jours

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- PCR

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

119.7