



Catalogue des analyses - Laboratoire

Clostridioides difficile - PCR (test rapide)

Selles

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Détection par PCR de 3 cibles de *C.difficile* (Toxine B, Toxine binaire, Ribotype O27). En cas de PCR positive, un test immunochromatographique est effectué pour la mise en évidence de l'antigène GDH.

Indication diagnostique

Colite pseudo-membraneuse ou diarrhée acquise sous antibiothérapie ou chimiothérapie.
La recherche de *C. difficile* n'est pas indiquée chez l'enfant de < 1 an, ni chez les patient-e-s atteint-e-s de mucoviscidose (% élevé de portage asymptomatique)

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien


[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso - Rubrique "Affections gastrointestinales"

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Selles diarrhéiques
Instruction(s) particulière(s)	1 échantillon par épisode infectieux.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc
	
	N° commande : 997242
Volume minimum	~1/3 du tube (Ne pas aller au-delà de la moitié du pot)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.
Stabilité maximale avant analyse	
Réfrigéré	Nuit
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	<ul style="list-style-type: none"> Température ambiante Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures. Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

119.7

Condition(s) spéciale(s)

Un test PCR positif entraîne des coûts supplémentaires (C.difficile GDH et Tox A/B), position 3400.00 = 47 CHF