



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cryptococcus neoformans antigènes (Test rapide)

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Détection par test immunochromatographique des antigènes capsulaires de *Cryptococcus neoformans* dans le sang. En cas de résultat positif, une titration est effectuée.

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum gel



Monovette ISO bouchon MARRON - N° commande : 966438

Contenant(s) autre(s)

1. Tube 4.9 ml EDTA-K
2. (Sang complet accepté mais uniquement si très peu de sang)

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Les tubes validés pour le test sont :

- Tubes sérum (avec ou sans gel)
- Tubes avec anticoagulants: EDTA sodium, EDTA potassium, Citrate sodium, Héparine sodium
- (Sang complet uniquement si très peu de sang)

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaires d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaires d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Résultats

Délai de rendu

< 24h

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Immunochromatographie

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

1 année

Tarif

Tarif (CHF)

69.3

Condition(s) spéciale(s)

Position 3414.00, détection qualitative (=Tarif indiqué). Si détection positive, quantification effectuée, position 3416.00 (la position 3416.00 annule la position 3414.00)