



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Cryptococcus neoformans antigènes (Test rapide)**

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Détection par test immunochromatographique des antigènes capsulaires de <i>Cryptococcus neoformans</i> dans le sang. En cas de résultat positif, une titration est effectuée.
<b>Ajout d'analyse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.</li><li>• Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li></ul>
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bactériologie</li><li>• Microbiologique</li></ul>
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum gel



Monovette ISO bouchon MARRON - N° commande : 966438

#### Contenant(s) autre(s)

1. Tube 4.9 ml EDTA-K
2. (Sang complet accepté mais uniquement si très peu de sang)

#### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Nuit

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Les tubes validés pour le test sont :

- Tubes sérum (avec ou sans gel)
- Tubes avec anticoagulants: EDTA sodium, EDTA potassium, Citrate sodium, Héparine sodium
- (Sang complet uniquement si très peu de sang)

#### Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de  $\leq 24$  heures, accepté jusqu'à 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Microbiologie

**Résultats****Délai de rendu**

&lt; 24h

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Immunochromatographie



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 1 année

### Tarif

**Tarif (CHF)** 69.3

---

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3414.00, détection qualitative (=Tarif indiqué). Si détection positive, quantification effectuée, position 3416.00 (la position 3416.00 annule la position 3414.00)