



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture - Selles nouveau-né

Méconium - Entérocolite nécrosante

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de selles chez le nouveau-né.

Indication diagnostique

Indiquer le contexte de suspicion d'entérocolite nécrosante ou alors 1ère selle méconium.

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande**Numéro de commande**

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Méconium
- Selles

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Culture

Post analytique

Conservation après examens**Prélèvement primaire**

10 jours

Tarif**Tarif (CHF)**

180

Condition(s) spéciale(s)

Position 3339.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3338.00 si négatif