Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bactériologie générale culture - Selles nouveau-né

Méconium - Entérocolite nécrosante



## Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de selles chez le nouveau-né.
Indication diagnostique	Indiquer le contexte de suspicion d'entérocolite nécrosante ou alors 1ère selle méconium.
Ajout d'analyse	<ul> <li>L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.</li> <li>Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li>Bactériologie</li><li>Microbiologique</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Formulaire de demande  Renseignements à fournir	743200 Lien
	743200 <b>Lien</b> <u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u>
Renseignements à fournir	743200 <b>Lien</b> <u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u>
Renseignements à fournir  Pré analytique	743200 <b>Lien</b> <u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u>
Renseignements à fournir  Pré analytique  Prélèvement	743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques  Compléter le bon recto et verso  • Méconium
Renseignements à fournir  Pré analytique  Prélèvement  Nature	743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques  Compléter le bon recto et verso  • Méconium





 $N^{\circ}$  commande : 997242

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement** 

#### **Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde



	des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	

10 jours

180

négatif



Prélèvement primaire

Condition(s) spéciale(s)

**Tarif** 

Tarif (CHF)

Position 3339.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3338.00 si