

Catalogue des analyses – Laboratoire

Bactériologie - Culture

Frottis sphère génitale (sauf col et vagin)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies dans les échantillons de frottis anus et frottis de la sphère génitale.
- Pour les frottis de col et vagin, consultez la fiche spécifique à ces 2 échantillons.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 – IMU – Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis gland
- Frottis lochies
- Frottis périnée
- Frottis urètre
- Frottis vulve

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

ESwab (bouchon rose Copan) ou milieu équivalent

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante, délai < 24 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaires d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	63
Condition(s) spéciale(s)	Position 3335.00 si positif = 70 CHF - Position 3334.00 si négatif = 63 CHF