Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01508

V14 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Helicobacter pylori culture

Biopsie gastrique



Information(s) importante(s)

Attention

• Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

_			
Eva	m	\mathbf{a}	n
CAO	Ш	_	

But de l'analyse	Recherche spécifique par culture d'Helicobacter pylori dans les échantillons de biopsie gastrique.
Ajout d'analyse	L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 24 heures.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Helicobacter pylori culture
Pré analytique	

Prélèvement

• Biopsie gastrique

Matériel standard

Quantité

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Volume minimum

2 biopsies

Stabilité maximale avant envoi

Congelé

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	L'échantillon doit être acheminé le plus rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture. Si ce n'est pas possible, les biopsies doivent être congelées dans un tube stérile sec (Sans ajout de solution physiologique).
Can distance dia alcansina ana ant	• A température ambiante dans le cas où l'échantillon est acheminé

Conditions d'acheminement

- A température ambiante dans le cas où l'échantillon est acheminé rapidement.
- Si les biopsies ont été congelées, elles doivent être acheminées congelées.

Acheminement

Conditions d'acheminement	Germe fragile, l'échantillon doit être acheminé au laboratoire immédiatement (Idéalement dans les 2 heures).
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	72



Condition(s) spéciale(s)

3431.00 si positif (=Tarif indiqué) - Position 3430.00 si négatif