Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoculture chez l'adulte

Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Recherche par culture de bactéries et levures dans le sang. Faire parvenir au laboratoire une ou plusieurs paires. La paire comprend un flacon aérobie (bleu) + un flacon anaérobie (violet) En cas de suspicion de germes à croissance lente ou endocardite, une prolongation d'incubation peut-être demandée mais uniquement par téléphone au 021 314 41 07.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
Fréquence et/ou horaire d'exécution	 Les flacons qui arrivent à la réception des laboratoires sont pris en charge et incubés de ~07h00 à 22h00 (7 jours sur 7) Les flacons positifs sont pris en charge de 07h00 à 19h00 (7 jours sur 7)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Bactériologie Microbiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Bon 151 recto, cocher le site (périphérique ou autre) de la prise (si besoin compléter le champ localisation en bas de page)



Pré analytique

Prélèvement

• Sang

Instruction(s) particulière(s)

- Ne rien coller sur le code-barre du flacon
- Ne pas détacher le code-barre du flacon

Matériel standard

Flacon BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium - bouchon bleu + Flacon BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Medium - bouchon violet



NULL

Volume minimum 8 à 10 ml de sang par flacon, respecter les volumes indiqués sur les

flacons (Ne pas aller au-delà de 10 ml, augmente le risque de faux

positifs)

Matériel pédiatrique

Quantité Se référer à la fiche "Hémoculture chez l'enfant"

Matériel néonatologie

Quantité

Se référer à la fiche "Hémoculture chez l'enfant"

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation Température ambiante durant la nuit (Ne jamais mettre au frigo)

Acheminement

Conditions d'acheminementTempérature ambiante et transfert dès que possible (recommandé ≤ à

24 heures)

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46



	1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Résultats	
Interprétation	En cas de positivité, les résultats sont communiqués par téléphone.
Méthode analytique Principe de la méthode	• Culture
Analyseur	Les flacons sont incubés 5 jours (Jusqu'à 14 jours si demande de prolongation, par exemple endocardite)



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Non
Aliquote congelé	Non
Tarif	
Tarif (CHF)	139.5
Condition(s) spéciale(s)	Position 3305.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3304.00 si négatif

