



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Abcès, Plaies, Frottis divers

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons profonds de type, abcès, kystes, plaies et frottis profonds.
- Recherche par culture de bactéries aérobies dans les échantillons superficiels.

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Abcès
- Frottis
- Frottis plaie
- Frottis plaie profonde
- Pus

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Contenant(s) autre(s)

ESwab (bouchon orange Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

| | |
|---|--|
| Prestataire | Laboratoire de microbiologie |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00 |
| Téléphone | 021 314 41 07 |
| Astreinte | Microbiologie |

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

10 jours.

Tarif

Condition(s) spéciale(s)

- ORL : Position 3301.00 si positif - Position 3300.00 si négatif
- Génital: Position 3335.00 si positif - Position 3334.00 si négatif
- Profonds: Position 3339.00 si positif - Position 3338.00 si négatif
- Superficiels : Position 3337.00 si positif - Position 3336.00 si négatif