

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Abcès, Plaies, Frottis divers



Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons profonds de type, abcès, kystes, plaies et frottis profonds. Recherche par culture de bactéries aérobies dans les échantillons superficiels.
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.
Pré analytique	

Pré analytique

Prélèvement

Nature	 Abcès Frottis Frottis plaie Frottis plaie profonde Pus
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	ESwab (bouchon rose Copan)



Contenant



N° commande: 935524

Contenant(s) autre(s)	ESwab (bouchon orange Copan)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
--------------	---

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture

Post analytique

Conservation après examens

10 jours. Prélèvement primaire

Tarif

• ORL: Position 3301.00 si positif - Position 3300.00 si négatif Condition(s) spéciale(s) • Génital: Position 3335.00 si positif - Position 3334.00 si négatif

• Profonds: Position 3339.00 si positif - Position 3338.00 si négatif

• Superficiels: Position 3337.00 si positif - Position 3336.00 si négatif

