Catalogue des analyses - Laboratoire

Streptococcus pneumoniae antigènes urinaires (Test rapide)

Urines



Informations générales

_		
Ev	~ m	nn
	ап	ıen

But de l'analyse	• Détection par test immunochromatographique des antigènes de <i>Streptococcus pneumoniae</i> dans les urines natives.
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	 Urine milieu du jet Urine native Urine néphrostomie Urine sondage aller retour Urine sonde à demeure Urine sondée
Instruction(s) particulière(s)	Ne PAS utiliser le tube UriSponge pour cette analyse
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine





Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement • Température ambiante

- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Immunochromatographie
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours

28.8



Prélèvement primaire

Tarif

Tarif (CHF)