



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Urines

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Les urines début du jet ne sont pas acceptées pour la culture (souvent contaminées).
- Les urines doivent être acheminées rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture.
- En dehors des heures d'ouverture, elles doivent impérativement être conservées entre 2 - 8°C.
- Si le volume est < 1.5 ml, utiliser le tube de 8.5 ml monovette jaune.

Ajout d'analyse

- Si tube UriSponge (urine stabilisée), l'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
- Si tube monovette urine (urine non stabilisée), l'analyse peut être ajoutée dans un délai ≤ 24 heures. Au-delà de 24 heures, l'analyse est refusée.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

UriSponge (bouchon jaune) (urine stabilisée)



N° commande : 935607

Contenant(s) autre(s)

Tube 8.5 ml pour urine si la quantité est < à 1,5ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le tube UriSponge est dédié uniquement à la culture bactériologie et/ou levure.

Pour tout autre analyses, ajouter un tube 8.5ml monovette jaune.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Si monovette jaune (urine non fixée), le délai est de ≤24 heures (Idéalement 2 heures). Au-delà de ce délai, l'analyse est refusée.
- Si UriSponge (urine fixée), le délai optimal est de 24 heures, accepté jusqu'à 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaires d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaires d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

99

Condition(s) spéciale(s)

Position 3333.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3332.00 si négatif.