Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01532

V19 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Urines



Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Les urines début du jet ne sont pas acceptées pour la culture (souvent contaminées). Les urines doivent être acheminées rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture. En dehors des heures d'ouverture, elles doivent impérativement être conservées entre 2 - 8°C. Si le volume est < 1.5 ml, utiliser le tube de 8.5 ml monovette jaune.
Ajout d'analyse	 Si tube UriSponge (urine stabilisée), l'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve. Si tube monovette urine (urine non stabilisée), l'analyse peut être ajoutée dans un délai ≤24 heures. Au-delà de 24 heures, l'analyse est refusée.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Bactériologie Microbiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



Pré analytique

Prélèvement

• Urine

Matériel standard

Quantité

Contenant UriSponge (bouchon jaune) (urine stabilisée)



N° commande: 935607

Contenant(s) autre(s)Tube 8.5 ml pour urine si la quantité est < à 1,5ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le tube UriSponge est dédié uniquement à la culture bactériologie et/ou levure.

Pour tout autre analyses, ajouter un tube 8.5ml monovette jaune.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

• Température ambiante

• Si monovette jaune (urine non fixée), le délai est de ≤24 heures (Idéalement 2 heures). Au-delà de ce délai, l'analyse est refusée.

 Si UriSponge (urine fixée), le délai optimal est de 24 heures, accepté jusqu'à 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne



Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Position 3333.00 si positif (= Tarif indiqué) – Position 3332.00 si

négatif.

