



Catalogue des analyses - Laboratoire

Aspergillus antigène sang

Sérodiagnostic

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Si suspicion infection invasive à Aspergillus, les antigènes galactomannane de la paroi du champignon peuvent être recherchés dans le sérum
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Sérologie microbienne
Synonyme	Antigène aspergillome aspergillose champignons filamenteux fungus-ball galactomannane

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien 060 - IMU - Examens sérologiques
------------------------------	--

Pré analytique

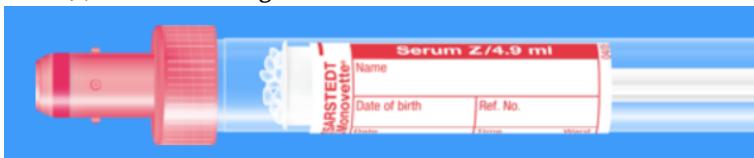
Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">• Sang veineux
---------------	--

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun – N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel 



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

- Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
- Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de sérologie (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- EIA

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 26.1

Condition(s) spéciale(s) Supplément selon la liste des analyses facturables en sus