



Catalogue des analyses - Laboratoire

B-D-glucan

Sérodiagnostic

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Si suspicion d'infection fongique invasive ou d'une pneumonie à *Pneumocystis*, l'antigène 1,3-beta-D-glucan de la paroi du champignon peut être recherché dans le sérum

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Sérologie microbienne

Synonyme

Aspergillose candidose champignons filamenteux galactomannane
infection fongique invasive *pneumocystis*

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

913346

Lien

[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999008

Contenant(s) autre(s)

3 à 4 Microtubes 0.3 ml sérum

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

- Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
- Décanner le sérum, volume minimum : 2 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de sérologie (microbiologie)

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Dosage cynétique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

81.9