

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# B-D-glucan

Sérodiagnostic

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Si suspicion d'infection fongique invasive ou d'une pneumonie à Pneumocystis, l'antigène 1,3-beta-D-glucan de la paroi du champignon peut être recherché dans le sérum

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Sérologie microbienne

#### Synonyme

Aspergillose candidose champignons filamenteux galactomannane  
infection fongique invasive pneumocystis

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

913346

##### Lien

[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

#### Matériel néonatalogie

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510312

#### Contenant(s) autre(s)

3 à 4 Microtubes 0.3 ml sérum

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

- Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
- Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml

#### Conservation

4°C



**Conditions d'acheminement** à T° ambiante  
à -20°C si envoi >8 heures

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de sérologie (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbio sérologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Dosage cynétique

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 81.9