

Catalogue des analyses - Laboratoire

Borrelia burgdorferi LCR

Sérodiagnostic IgG + calcul de synthèse intrathécale

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Sérologie microbienne
Synonyme	Lyme, neuroborréliose
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien 060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">• Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Instruction(s) particulière(s)	Associer systématiquement un échantillon de sang veineux (sérum) lors de la recherche dans le LCR pour un dosage simultané. NB : le cas échéant, un Quotient albumine LCR/Sérum est indispensable pour le calcul de la synthèse intrathécale.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	2 ml
Matériel pédiatrique	
Quantité	1

Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml
------------------	--



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2 ml

Matériel néonatalogie

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimum 2 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures



Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Chemiluminescence
Analyseur	LIAISON XL

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 15.7