

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cytomégalovirus

Sérodiagnostic IgG et IgM

## Informations générales

### Examen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 107  |
| Horaire de réalisation     | Heures ouvrables du laboratoire  |
| Analyse accréditée         | OUI  |
| Spécialité                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sérologie microbienne</li></ul>                  |
| Synonyme                   | CMV  |
| Prescription               |  |
| Formulaire de demande      | Numéro de commande<br>913346<br>Lien<br><a href="#">060 - IMU - Examens sérologiques</a> |

## Pré analytique

### Prélèvement

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nature            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sang veineux</li></ul>   |
| Matériel standard |  |
| Quantité          | 1  |
| Contenant         | Tube 7.5 ml sérum gel<br><br>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677 |

### Matériel pédiatrique

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Quantité  | 1                          |
| Contenant | Tube 4.9 ml sérum sans gel |



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

### Matériel néonatalogie

|   |   |
|---|---|
| Quantité  | 1   |
| Contenant   | Tube 1.2 ml sérum   |
|   |   |
|   | S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994                              |
| Contenant(s) autre(s)                               | 3 à 4 Microtubes 0.3 ml sérum   |
| Volume minimum                                      | min 1 ml  |
| Stabilité maximale avant envoi                      |   |
| Réfrigéré   | Nuit et we  |
| Traitements du prélèvement pour requérants externes |   |
| Préparation   | Centrifuger durant 10 minutes à 2500G<br>Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml |
| Conservation  | 4°C   |
| Conditions d'acheminement                           | à T° ambiante<br>à -20°C si envoi >8 heures                                       |
| Acheminement  |   |
| Dépose des prélèvements                             | Réception des laboratoires  |
| Site  | BH18-100  |
| Adresse   | Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| Pneumatique   | 439   |
| Horaire d'ouverture de la réception                 | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30                                |



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

---

**Prestataire** Laboratoire de sérologie (microbiologie)

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 021 314 41 07

---

**Astreinte** Microbio sérologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Chemiluminescence

## Post analytique

### Tarif

---

**Tarif (CHF)** 45

---

**Condition(s) spéciale(s)** Supplément selon la liste des analyses facturables en sus