

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coxiella burnetii

Sérodiagnostic



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Suspicion d'endocardite
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Sérologie microbienne
Synonyme	Fièvre Q
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien

<u>060 - IMU - Examens sérologiques</u>



Pré analytique

Prélèvement

· Sang veineux **Nature**

Matériel standard

1 **Quantité**

Tube 7.5 ml sérum gel **Contenant**

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Tube 4.9 ml sérum sans gel **Contenant**



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G Préparation Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml 4°C Conservation à T° ambiante **Conditions d'acheminement** à -20°C si envoi >8 heures **Acheminement**

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements

BH18-100 Site

Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne



Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le person des laboratoires LCC-LCH	nel de garde
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>	
Analytique Prestataire		
Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 314 41 07	
Astreinte	Microbio sérologie	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	ChemiluminescenceIF	
Technique	Dépistage par chemiluminescence, titration des positifs pimmunofluorescence	par



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 160.2

Condition(s) spéciale(s)Supplément selon la liste des analyses facturables en sus

