



Catalogue des analyses - Laboratoire

Oreillons

Sérodiagnostic IgG et IgM

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Sérologie microbienne

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
913346
Lien
[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Matériel néonatalogie

Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml sérum

S-Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998994

Contenant(s) autre(s)	4 Microtubes 0.3 ml sérum
-----------------------	---------------------------

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré	Nuit et we
-----------	------------

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 10 minutes à 2500G Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml
-------------	---

Conservation	4°C
--------------	-----

Conditions d'acheminement	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
---------------------------	---

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
-------------------------	----------------------------

Site	BH18-100
------	----------

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
---------	----------------------------

Pneumatique	439
-------------	-----

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
-------------------------------------	---



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de sérologie (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Chemiluminescence

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 67.5

Condition(s) spéciale(s) Supplément selon la liste des analyses facturables en sus