



Catalogue des analyses - Laboratoire

Rickettsia

Sérodiagnostic

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Important : analyse sous-traitée, disponible uniquement en interne.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse sous-traitée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> • Sérologie microbienne
Synonyme	Rickettsia conorii Rickettsia typhi Rickettsia africae
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 913346</p> <p>Lien 060 - IMU - Examens sérologiques</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Stabilité maximale avant analyse**Réfrigéré**

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml**Conservation**

4°C

Conditions d'acheminementA T° ambiante. Si envoi >8 heures
à -20°C**Acheminement****Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie