Catalogue des analyses - Laboratoire

Rougeole

Sérodiagnostic IgG et IgM

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Sérologie microbienne

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

913346 **Lien**

060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité ¹

Tube 7.5 ml sérum gel

Contenant

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 10 minutes à 2500G Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Chemiluminescence
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	71.1
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus

