Catalogue des analyses - Laboratoire

## Rubéole

Sérodiagnostic IgG et IgM

## Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

• Sérologie microbienne

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

913346 **Lien** 

<u>060 - IMU - Examens sérologiques</u>

Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

**Matériel standard** 

Quantité <sup>1</sup>

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité <sup>1</sup>

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

## Matériel néonatologie

**Quantité** 

Tube 1.2 ml sérum

Serum Z/1.2 ml

Serum Z/1.2 ml

Serum Z/1.2 ml

Serum Z/1.2 ml

S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Contenant(s) autre(s)

4 Microtubes 0.3 ml sérum

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml 4°C **Conservation** à T° ambiante **Conditions d'acheminement** à -20°C si envoi >8 heures **Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique** Lundi-vendredi: 6h30-18h30 Horaire d'ouverture de la réception Samedi: 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



| Téléphone                          | 021 31 44 280   |       |
|------------------------------------|---|-------|
| Astreinte                          | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de<br>des laboratoires LCC-LCH | garde |
| Site web                           | <u>Réception des laboratoires</u>   |       |
| Analytique                         |   |       |
| Prestataire                        |   |       |
| Prestataire                        | Laboratoire de sérologie (microbiologie)  |       |
| Site                               | BH18-100  |       |
| Adresse                            | Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |       |
| Tube pneumatique                   | 439   |       |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé              |       |
| Téléphone                          | 021 314 41 07   |       |
| Astreinte                          | Microbio sérologie  |       |
| Méthode analytique                 |   |       |
| Principe de la méthode             | Chemiluminescence   |       |
| Analyseur                          | LIAISON XL  |       |
| Post analytique                    |   |       |
| Tarif                              |   |       |
| Tarif (CHF)                        | 38.2  |       |
| Condition(s) spéciale(s)           | Supplément selon la liste des analyses facturables en sus                                 |       |



Condition(s) spéciale(s)