

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Varicelle-zona

Sérodiagnostic IgG et IgM

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sérologie microbienne</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	VZV, varicelle zona virus
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 913346</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">060 - IMU - Examens sérologiques</a></p>

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**


- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

---

**Contenant** Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

---

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440


## Matériel néonatalogie

### Quantité

1

### Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel

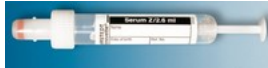

Monovette bouchon blanc - N° commande : 510312

### Contenant(s) autre(s)

4 Microtubes 0.3 ml sérum

### Stabilité maximale avant envoi

### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G  
Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml

### Conservation

4°C

### Conditions d'acheminement

à T° ambiante  
à -20°C si envoi >8 heures

### Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbio sérologie
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chemiluminescence</li></ul>
<b>Post analytique</b>	
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	67.5
<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus